


— Soft laser expertise

# premio 30

Laser duo

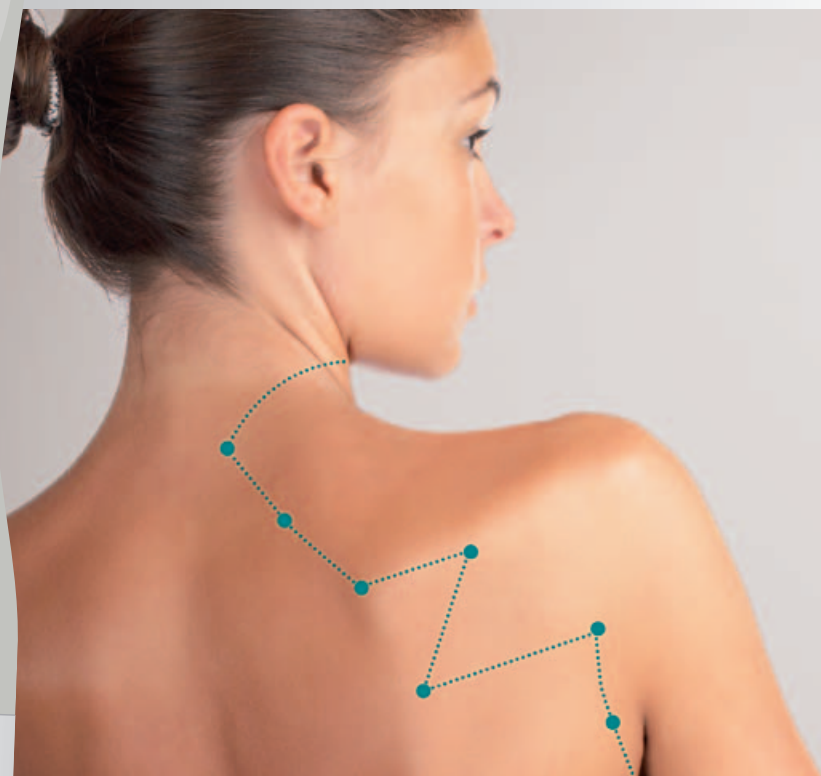

Acupuntura  
Auriculoterapia  
Tratamiento adicciones  
Reflexoterapia

Sedatelec


# premio 30

Laser duo

Estimulación indolora de los puntos del cuerpo y de la oreja



**4 modos  
de tratamiento**

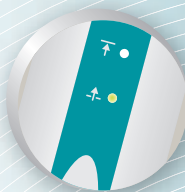

**2 potencias  
adaptadas**

puntos superficiales  
puntos profundos



**Autonomía superior  
a 10 horas**

Batería  
recargable

# Entre tradición y modernidad: **seguro y eficaz**

## Acupuntura

### Tonificación

Tonificación de los puntos de acupuntura **controlada y rápida.**



### Dispersión

En pocos segundos, usted realiza **la dispersión del Qi** y evacúa el stasis de energía.



### Armonización

Este tratamiento **reequilibra el punto y la circulación en el meridiano**, alternando los ritmos de los impulsos.



## Auriculoterapia

### Estimulación frecuencial

Esta selección garantiza una estimulación de los puntos « patológicos » en **auriculoterapia** (dolores, trastornos psicológicos o trastornos funcionales, adicciones, etc.).



# Innovación y eficacia de las frecuencias

## Nueva dinámica de emisión de impulsos


### Vobulación (100-10 000Hz)

#### Aceleración exponencial

La tonificación es el resultado de una **aceleración** del **ritmo de emisión de los impulsos**, con un efecto dinamizante.



Tonification  
impulse rate

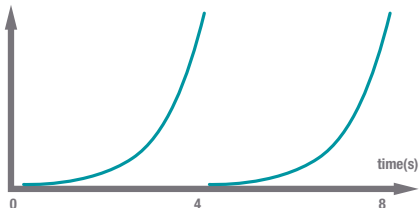


#### Desaceleración exponencial

La dispersión se alcanza por un **enlentecimiento** del **ritmo de emisión de los impulsos**.



Dispersion  
impulse rate

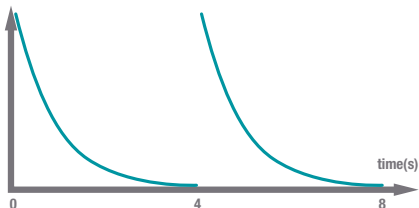


#### Aceleración y desaceleración alternadas

Una **alternancia de aceleración y de enlentecimiento** del ritmo de emisión lleva a la armonización del punto.



Harmonisation  
impulse rate

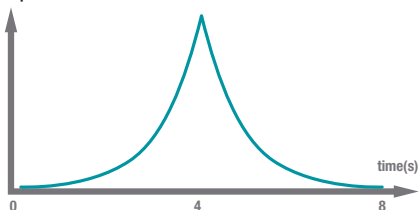

## Barrido

### Según las 7 frecuencias de Nogier

El mensaje está contenido en la frecuencia para ese programa de auriculoterapia.

Permite la emisión sucesiva, por **barrido**, de todas las frecuencias Nogier frecuencias (A, B, C, D, E, F y G)





# Experticia reconocida en Láser Pulsado

## Longitud de onda

La emisión **Infrarroja** tiene una **longitud de onda de 905nm** que atraviesa la barrera cutánea, alcanza las células en profundidad y penetra con total seguridad sin ser absorbida por el agua, la hemoglobina y la melanina de la piel.

## Valor cresta

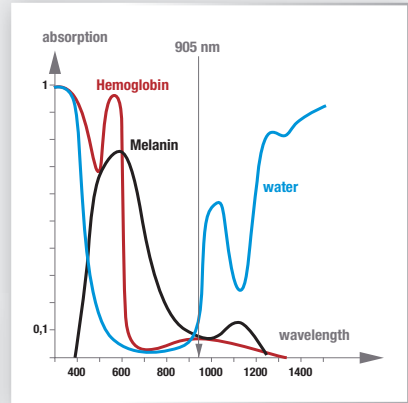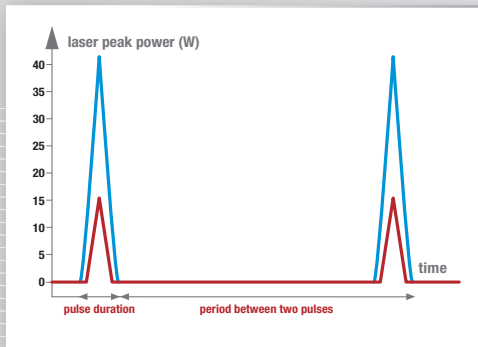

La radiación láser se emite bajo la forma de impulsos cortos de alta potencia cresta. Este modo de emisión otorga al rayo láser la **potencia necesaria para penetrar en los tejidos** respetándolos al mismo tiempo, por cuanto, sin un efecto térmico destructor, aporta la información útil en el punto.

## Potencia regulable

La potencia de 15 o 40 Watts es regulable en función de la profundidad deseada:

- **Puntos superficiales:** puntos en la superficie (rostro, orejas, etc.)
- **Puntos profundos:** otros puntos del cuerpo.

## Tiempo de aplicación

Tratamiento **corto de 30 segundos** para cada punto. Este tiempo de aplicación permite aportar la energía óptima por punto y tomar en consideración el tiempo fisiológico de reacción del cuerpo.

El **+** Sedatelec:  
**vobulación de frecuencia en acupuntura**

La señal Sedatelec:  
**las frecuencias Nogier en auriculoterapia**





# premio 30

Laser duo

**Eficaz, ligero  
y ergonómico**

Un **láser sin hilos**,  
Ideal en el consultorio  
y para desplazamientos



*Emisión láser invisible. No dirigir el rayo láser a los ojos. Clasificación 3B según IC60825-1  
Caution : Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.*

Pida hoy la documentación « Más información » sobre el Premio 30 a su distribuidor o escribiendo a [sedatelec@sedatelec.com](mailto:sedatelec@sedatelec.com)

Su distribuidor



Fabricado en Francia

**Sedatelec** • Chemin des Mûriers • F-69540 Irigny • Lyon • France • Tél. +33 (0) 472 663 322  
Fax + 33 (0) 478 508 903 • [sedatelec@sedatelec.com](mailto:sedatelec@sedatelec.com) • [www.sedatelec.com](http://www.sedatelec.com)

