

GARANTIA

ART. NAME		DEALER(SERVICE CENTER)
MODEL		
CUSTOMER		
ADDRESS		
TEL		
DATE OF PURCHASE		EXPIRY: ONE YEAR FROM DATE OF PURCHASE

Si se detecta un mal funcionamiento del aparato durante el periodo de garantía (dos años) y bajo las siguientes condiciones, el producto se reparará gratuitamente:

- Si hay alguna parte del aparato deteriorada, rota o en mal estado de funcionamiento a la hora de la compra.
- Daño o avería acometidos durante el uso del aparato si se ha seguido las instrucciones del mismo.
- Daño de las partes no activas.
- Todo daño proveniente de un intento de reparación por parte del cliente, no será reparado gratuitamente.



PRECAUCIONES:



- No utilizar con enchufes multicabeza y con cables o enchufes deteriorados.
- No presione el cable de corriente.
- No utilizar en lugares o zonas inapropiadas.
- No lanzar o arrojar ningún producto inflamable o lugares donde exista productos o maquinas de aceite.
- No acercarse a insecticidas, pintura o similar.
- No utilizar en casos anormales tales como mala respiración y mantenga el aparato alejado del alcance de los niños.
- No utilizar durante más de 15 minutos seguidos.

Lugar de trabajo:

- Utilizar en lugares fijos, no móviles.
- Mantener el producto alejado de la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de seguridad:

- Desenchufar si no se está utilizando, o se está durmiendo etc..
- No reparar por su cuenta. Existe un departamento técnico, que lo revisará. Póngase en contacto con su distribuidor.

Mantenimiento:

- Por favor, desconectar el aparato cuando se está reparando.
- Por favor, limpiar el polvo del aparato periódicamente
- Después de un largo periodo de tratamiento o de encendido, se debe tener un especial cuidado. Hay que desconectar el aparato de la toma de alimentación si no se usa por un largo periodo, cuando se deja solo en casa o cuando el usuario esté durmiendo

Datos Técnicos:

Número del producto: SL-C21

Nombre: Masajeador Multifunción Spirit Messenger

Voltaje: AC220 V 50 Hz, AC110 60 Hz

Potencia: 15 W

Instrucciones:



- Equipado con 3 tipos de cabeza para el masajeador, puede masajear su cabeza y alguna otra área especial. Permite un reemplazo fácil y rápido.



Función:

- Masaje de distintos puntos del cuerpo para estimular órganos.
- Mejora la circulación de la sangre para reforzar el organismo.

Función:

- Equipado con 3 tipos de cabeza para el masajeador, puede masajear su cabeza y alguna otra área especial. Permite un reemplazo fácil y rápido.
- Presenta 3 opciones de vibración, dependiendo de la fuerza transmitida.
- Equipado con un mango antideslizamiento que permite un manejo cómodo y fácil.
- Diseñado con un interruptor especial para un manejo fácil.

MASAJEADOR MULTIFUNCION SPIRIT MASSAGER

