

VS4002

VENTOSAS DE PLASTICO (15UD.)



Estas ventosas están diseñadas sólo para el uso de personas cualificadas. Usted deberá consultar con su terapeuta antes de usar el producto. No utilice las ventosas durante más de 5 minutos.

MODO DE EMPLEO

El proceso de utilización del maletín es el siguiente: coger la pistola, colocar la goma verde, en el final de la pistola. Una vez acoplada la goma al extremo de la pistola, colocar la ventosa a utilizar.

Una vez colocada la ventosa elegida, el paso siguiente, es aplicar el tratamiento en la zona determinada a tratar.

Coloque la boca de la ventosa sobre la zona de la piel, y poco a poco, succione con el mando de la pistola. Una vez llegado a la presión deseada, puede retirar la pistola y la goma, quedando la ventosa unida a la piel.

Y repetidamente, realizaremos el proceso, de la misma forma a la inicial, con las ventosas que deseemos utilizar.

Una vez acabado el tratamiento, se recomienda limpiar la ventosa cuidadosamente, para las siguientes sesiones.

PRECAUCIONES

- Antes de acostarse es el momento ideal de aplicar la ventosa siendo necesario evitar hacerlo inmediatamente después de comer o practicar ejercicios intensivos.
- La aplicación general de la ventosa en todo el cuerpo se puede realizar una vez al día durante un mes, al cabo de este tiempo se ajusta la frecuencia según el caso.

- Usted debería tumbarse tendido en la cama para proceder a la correcta operación. No se recomienda poner demasiado número de ventosas o en una amplia superficie.
- Las personas de condición física frágil deberán limitar la operación en 20 segundos, siendo 5 minutos lo indicado para personas de condición física normal. La aplicación de la ventosa en el abdomen es contraindicada para las mujeres embarazadas de más de 3 meses.
- La aplicación de la ventosa es igualmente contraindicada para personas con enfermedades de hemorragias.
- No aspire ni presione de forma excesiva las ventosas.
- No ponga las ventosas en el agua hirviendo, pueden deformarse.
- Cada vez que se termina de usar, hay que esterilizar las ventosas antes de guardarlas para la siguiente sesión.

CONSEJOS DURANTE EL TRATAMIENTO:

1. Tómese el tiempo de ir acostumbrándose a la intensidad de estimulación. En la primera sesión, aplique una presión suave limitando el número de ventosas en 5 o 6.
2. La fatiga es el síntoma normal durante la operación. No obstante si es severa, conviene parar la operación temporalmente y reanudarla reduciendo la presión.
3. En caso crónicos es posible notarse signos de afección aguda antes de la recuperación, lo cual es una respuesta inevitable que precede al verdadero proceso de curación; en varias ocasiones, usted tendrá que esperar hasta que su condición mejore. (muchas personas dejan de usar la terapia debido a los síntomas).

Después de una sesión, el pigmento de la piel podría cambiar, no incremente la cantidad de ventosas sólo con el fin de conseguir una mejor respuesta de pigmento.