

# Cable universal para ITO ES-130


---



Cable con dos salidas banana lo que aumenta las posibilidades de conexión:


- **Elige pinzas o electrodos:** Con la salida banana tienes la posibilidad de utilizar ambos sistemas y convertir el ITO-ES130 en un potente TENS.
- **Duplica cada salida:** Pasa de 3 salidas a 6. Usa cables duplicadores o bifurcadores para aumentar las posibilidades de ITO ES-130 (el uso recomendado por potencia de pila es usar como mucho dos o tres duplicadores)

## Posibilidad de uso con electrodos con salida banana

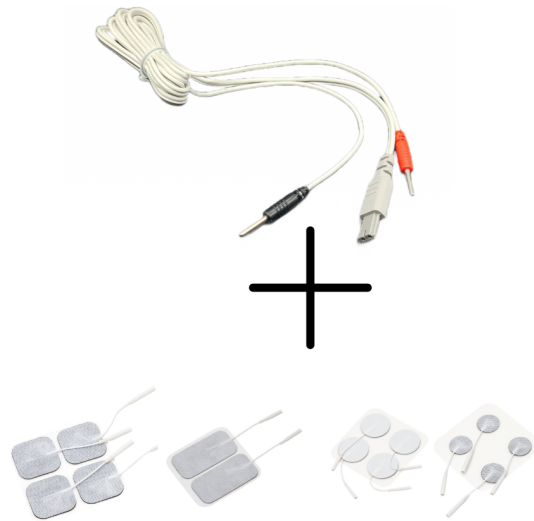

## Uso con pinzas

Se puede usar también para conectar pinzas (se recomienda el uso de pinzas sin cable para una transmisión más directa de la intensidad)

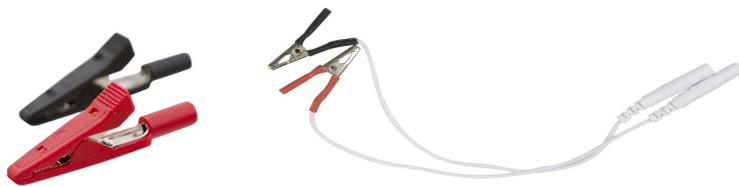

## Uso con el cable bifurcador

Combínalo con el cable bifurcador para poder conectar el doble de electrodos o pinzas



---

También hay que tener en cuenta que aumentar de forma excesiva el número de conexiones disminuirá la intensidad de la corriente.

**Técnica recomendada de neuromodulación: uso de polo negativo en nervio y dos polos positivos en músculo.**

## Ejemplos de uso

